

# GUIA DE USO LECTOR RFID MINI CHIP PARA MASCOTAS

1. Presione el botón para iniciar el dispositivo y activar la acción de escaneo. Comience a escanear los microchips.



2. Dirija el chip a la antena, no debe dejar presionado el botón, únicamente apriete pase el lector por el chip y se llevará a cabo la lectura.

3. Mientras en pantalla se muestre avanzando la flecha puede realizarse la lectura, una vez que llegue al otro lado entrará en modo inactivo.

4. Repita la acción de presionar el botón cada vez que desee leer un nuevo chip.

5. Simulación de teclado USB: Conecte el cable USB del lector directamente a la computadora, cree un nuevo documento para poder almacenar las lecturas de los chips o coloque el puntero en el campo donde requiera los dígitos. Una vez conectado el lector comience las lecturas y los datos se irán registrando de manera directa.



6. Si no escanea chips, los dispositivos se apagarán automáticamente en 180 segundos o puede presionar el botón por 3 segundos para apagarlo.

7. El lector puede realizar hasta 3000 lecturas con la batería completamente cargada.

